

# 「自動ラップ式排泄処理ユニット」を搭載した



介護用  
自動ラップ式トイレ

# ラップポン・ブリオ

## 6/30 (FRI) NEW RELEASE!



バケツ  
洗浄不要



臭わず  
清潔



安心の  
音声ガイド



### ラップポンのある 介護生活



介護生活の中で排泄に関する悩みの臭い・不衛生さ・バケツ洗浄の手間は、ご本人だけでなくご家族の負担も増していきます。介護する側もされる側もトイレの負担を減らし、精神的にゆとりのある介護生活の実現に貢献します。

ラップポン・ブリオ

介護用自動ラップ式トイレ  
ラップポン・ブリオ

# 92,500円 (税抜)



### 安心の音声ガイド

NEW




作動ボタンを押した時に「処理を開始します」や処理終了時に「処理が完了しました。トレーから袋を取り出してください」等のアナウンスが流れるようになり、より便利にご使用いただけます。



### 処理時間の目安を表示

NEW

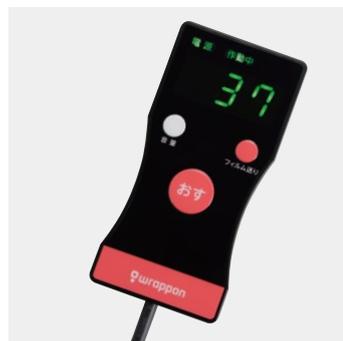

作動ボタンを押すと処理終了までをカウントダウン方式で表示します。処理終了までの目安がわかりやすくなりました。

# ラップ式排泄処理ユニットとは

水を使わず、熱圧着によって自動で排泄物と臭いを密封する「自動ラップ式排泄処理ユニット」を搭載したトイレです。排泄物を密封するためバケツ洗浄が必要ありません。

## ラップ式排泄処理ユニットの仕組み


### 1.ラップ処理開始

排泄後、手元スイッチのボタンを押すと自動ラップ処理が開始されます。



### 2.フィルム送り

排泄で飛び散った汚れ部分も全てフィルムが送られて閉じ込めます。

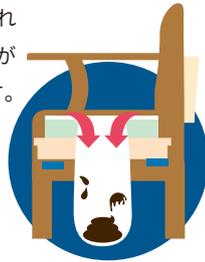



### 3.熱圧着

排泄物を密封するため熱圧着します。



### 4.切り離し

約90秒後、切り離され、密封した袋になります。

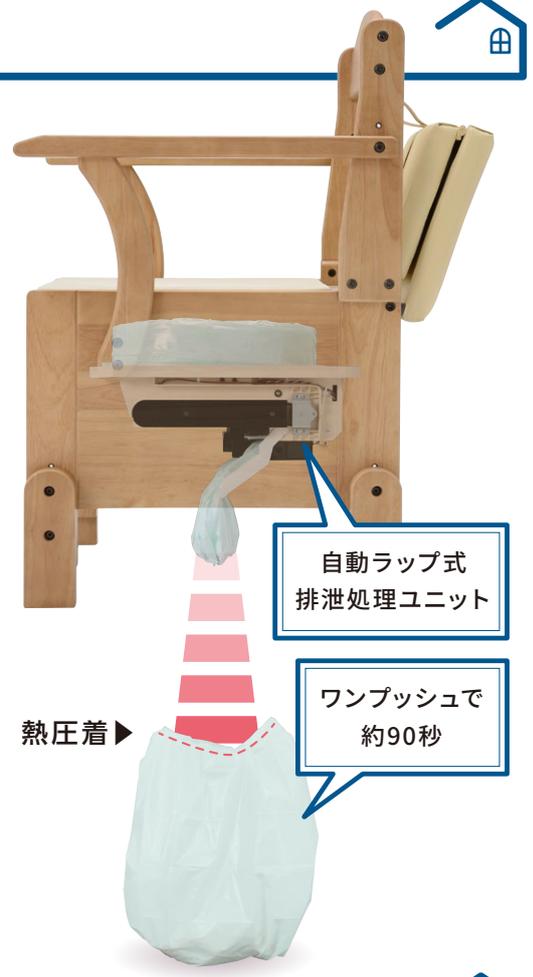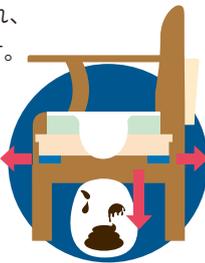

## 使い方



### 専用凝固剤を入れる

排泄物の水分を凝固させるために使用します。



### 作動ボタンを押す

排泄後、自動でラップを開始します。「処理を開始します。」とアナウンスが流れます。ラップ終了まで約90秒かかります。



### ラップ済み袋を取り出す

終了音が鳴り、「処理が完了しました。トレーから袋を取り出してください。」とアナウンスが流れると切り離し完了です。トレーを引いて、毎回ラップ済み袋を取り出してください。

● お問い合わせ先

● 販売店

 **日本セイフティー株式会社**

ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  
e-mail: kaigo@nihonsafety.com URL: <http://www.wrappon.com/kaigo>

ラップポン  
セイフティーコール  **0120-208-718**

受付時間：月～金 9:00～17:30  
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます。  
いただくことがありますので、予めご了承ください。

●掲載商品について 掲載内容は、平成29年4月現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

WPBR1704-00