


介護用ポータブルトイレ

ラッスポン・オーブ

バケツ

取扱説明書

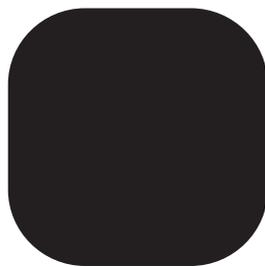

ラッスポン

はじめに

つかう

かたづける

こんなときは

この取扱説明書をお読みになり、内容をよく理解してからご使用ください。
この取扱説明書はいつまでも大切に保管してください。

もくじ

はじめに

ご使用になる前に	3
製品について	3
説明書について	3
安全にご使用いただくために	4
部品・付属品のご確認・消耗品のご紹介	8
各部のなまえ	9
製品本体	9
商品寸法図	10

つかう

本体を組み立てる	11
使用方法	13
暖房便座の使用方法	14
各種機能の使用方法	16

かたづける

お手入れをする	17
日常のお手入れ	17
保管をする	18
保管をする場所について	18

こんなときは

仕様	19
保証とアフターサービス	20

はじめに

つかう

かたづける

こんなときは

ご使用になる前に

このたびは、当社の介護用ポータブルトイレ「ラップポン・オーブ バケツ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書では、製品の正しい取り扱い方法と簡単な点検、お手入れ方法などについて説明しています。

安全にご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、正しくご使用ください。(取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負えませんので、ご注意ください。)

製品について

- ご使用にあたり、わからないことやご質問などがあれば、お買い上げの販売店、もしくはラップポン・セイフティーコールにお問い合わせください。
- 本製品は日本国内専用です。

説明書について

- この説明書は、この製品をご使用になる方がいつでも読める場所に大切に保管してください。また、紛失や破損したときは、お買い上げの販売店から新しい取扱説明書をご購入ください。
- 製品の改良のため、この取扱説明書の内容を予告なく変更することがあります。
- 取扱説明書や警告ラベルの図は、わかりやすくするために、形状の一部を省略または抽象化しているため、現物とは多少異なることがあります。なお、図示した表示の値などは一例です。
- この取扱説明書の知的所有権は当社に帰属します。当社に無断で内容の一部または全部を複製することを禁じます。

安全にご使用いただくために

ご使用の前に、この「安全にご使用いただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

注意事項の表示と意味		お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。	
 警告	この表示を無視して誤った使いかたをすると「人が死亡または重傷などを負う可能性がある」内容を示しています。		このような記号は、してはいけない「禁止」の内容です。 左図は「分解禁止」を示します。
	 注意	この表示を無視して誤った使いかたをすると「人がけがをする可能性があるか、物的損害が発生する」内容を示しています。	
			このような記号は、指示に基づく行為を「強制」する内容です。 「電源プラグ抜く」を示しています。

 警告		
 必ず守る 使用の際は身体状況によって介助者の付き添いや専門家に相談をする 身体状況によって介助者が付き添ったり、購入先や専門家に注意点を相談したりしてください。	 必ず守る 水平で安定した場所で使用する 不安定な場所に設置すると転倒してけがの原因になります。	 必ず守る 移乗の際は肘掛けや背もたれを手すり代わりに使用しない 転倒し、けがの原因になります。
 禁止 移動に介助が必要なかたや子供は、1人で使用しない <ul style="list-style-type: none"> ● いたづらをすると思わぬけがの原因になります。 ● 製品が転倒すると、けがの原因になります。 	 禁止 トイレ以外の目的として使用しない <ul style="list-style-type: none"> ● 乗り物に載せて座席のかわりに使用しない。 ● 踏み台として使用しない。 ● 荷台として使用しない。 転倒したり、製品が破損してけがの原因になります。	 禁止 体重100kg以上のかたは使用しない 製品が破損してけがの原因になります。

 警告		
 必ず守る	 禁止	 必ず守る
<p>使用者自身が身体の安定を十分に保てない場合は、介助者の付き添いのうえ使用する</p>	<p>濡れたり、汚れたままにしない しみやカビが発生したり、製品が破損するおそれがあります。</p>	<p>便座を本体に正しく取り付けて使用する 誤った位置に取り付けたまま使用すると、転倒したり、製品が破損してけがの原因になります。</p>
 禁止	 禁止	 禁止
<p>お手入れのときは、薄めた中性洗剤を使用し、次のものは使用しない (トイレ用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザーなど) 製品が破損し、けがの原因になります。 また、製品の変形、変色の原因になります。</p>	<p>次の場所で製品を設置・使用・保管しない ・ちりやほこりが多い場所 ・浴室など湿度が80%を超える場所 ・雨や直射日光が当たる場所 このような場所で設置・使用・保管すると、故障の原因になります。</p>	<p>製品に過大な負荷をかけない ●製品の上に立ち上がらない。 ●人を乗せたまま移動させない。 ●同時に2人以上で使用しない。 ●重いものを載せない。 ●強い衝撃を与えない。 転倒したり、製品が破損してけがの原因になります。</p>
 必ず守る	 禁止	 必ず守る
<p>隙間や開口部に身体の一部が挟まれないように注意する。 使用者がご利用の際に頭部や首、腕や足が隙間に挟まり、生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。</p>	<p>人を乗せたままや汚物や水が入ったまま移動しない けが、故障、服や床を汚す原因になります。</p>	<p>高さ調節脚、キャスターは、はめ込んだ後にひねってロックする はめ込んだままにすると外れてバランスがくずれ、転倒の原因になります。</p>
 必ず守る	 禁止	 必ず守る
<p>肘掛けを最後まで押し込み、ロックされていることを確認する 肘掛けが外れ、不安定になり、けがの原因になります。</p>	<p>本体や便座が破損したときは使用しない 故障や破損、けがの原因になります。</p>	<p>倒した背もたれの上に座らない 故障や破損、けがの原因になります。</p>

安全にご使用いただくために(つづき)

 警告		
 禁止 火気に近づけない 火災や変形の原因となります。	 禁止 お手入れのときは、薄めた中性洗剤を使用し、次のものは使用しない (トイレ用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザーなど) 製品が破損し、けがの原因になります。 また、製品の変形、変色の原因になります。	 禁止 次の場所で製品を設置・使用・保管しない ・ ちりやほこりが多い場所 ・ 浴室など湿度が80%を超える場所 ・ 雨や直射日光が当たる場所 このような場所で設置・使用・保管すると、故障の原因になります。
 禁止 立ち座りの時、肘掛けに過度な横方向の力を加えないこと。 製品が破損したりバランスを崩したりして転倒やけがの原因となります。	 禁止 肘掛けや背もたれなどにつかまったり身体を支えるために使用しない。 製品が破損したりバランスを崩したりして転倒やけがの原因となります。	


暖房便座の取扱について

<p>❗ 必ず守る</p> <p>電源プラグは交流100Vのコンセントに確実に差し込む</p> <p>差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。</p>	<p>❗ 必ず守る</p> <p>電源コード、ACアダプターは指定のもの以外は使用しない</p> <p>機械の破損の原因や危険を伴います。</p>	<p>🚫 禁止</p> <p>電源コードをステーブルや釘、針金などで固定しない</p> <p>電源コードが傷つき、感電やショート、火災の原因になります。</p>
<p>🚫 ぬれ手禁止</p> <p>ぬれた手で電源プラグやスイッチに触らない</p> <p>感電の原因になります。</p>	<p>❗ 必ず守る</p> <p>電源プラグをつないだまま移動させない</p> <p>コードに引っかかり転倒してけがをしたり、コード断線やショートの原因となります。</p>	<p>🚫 禁止</p> <p>雷が鳴ったら、本体や電源プラグに触れない</p> <p>感電の恐れがあります。</p>
<p>🔌 プラグを抜く</p> <p>長期間使用しないときには電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>絶縁劣化による感電・ろう電火災の原因になります。</p>	<p>❗ 必ず守る</p> <p>電源プラグのほこりは定期的に掃除する</p> <p>ほこりがたまると、絶縁不良となり、発熱して火災の原因になります。1ヶ月に1回は電源プラグをコンセントから抜き、ほこりを掃除してください。</p>	<p>🔌 プラグを抜く</p> <p>お手入れ・点検のときは、電源プラグを抜く</p> <p>電源プラグをコンセントから抜かないと、感電やけがの原因になります。</p>
<p>🚫 禁止</p> <p>コード類、プラグ類を破損するようなことはしない</p> <p>傷つけない。加工しない。高温部に近づけない。無理に曲げない。ねじったり引っ張ったり重いものを載せたり、束ねたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 傷んだまま使用すると、感電やショート、火災の原因になります。 ● 抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてください。 ● 電源コード等の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。 	<p>❗ 必ず守る</p> <p>電源コード・リモコンのコードを移動経路上に設置しない</p> <p>転倒や製品の破損により、けがの原因になります。</p>	


部品・付属品のご確認・消耗品のご紹介

部品・付属品のご確認

- この製品には、あらかじめ以下の部品・付属品が同梱されています。
- ご使用になる前に部品・付属品が揃っているかご確認ください。万が一、足りないときや破損しているときは、ただちにお買い上げの販売店にお知らせください。

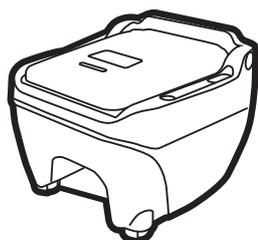


本体 1台

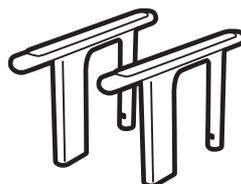


肘掛け左右 各1個

本体にあらかじめ取り付けられています。

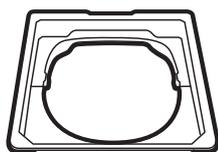

便座ベース 1個

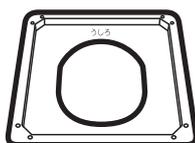


インサイドカバー 1個



便座 1個
(普通便座/やわらか便座/暖房便座)




バケツ 1個

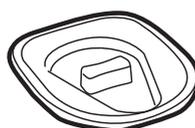

バケツ蓋 1個

付属品

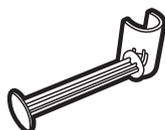

ペーパーホルダー 1個



肘掛け穴カバー 1個



取扱説明書 1冊



トレー 1個





高さ調節脚 8個



脚ゴム 4個

各部のなまえ


製品本体

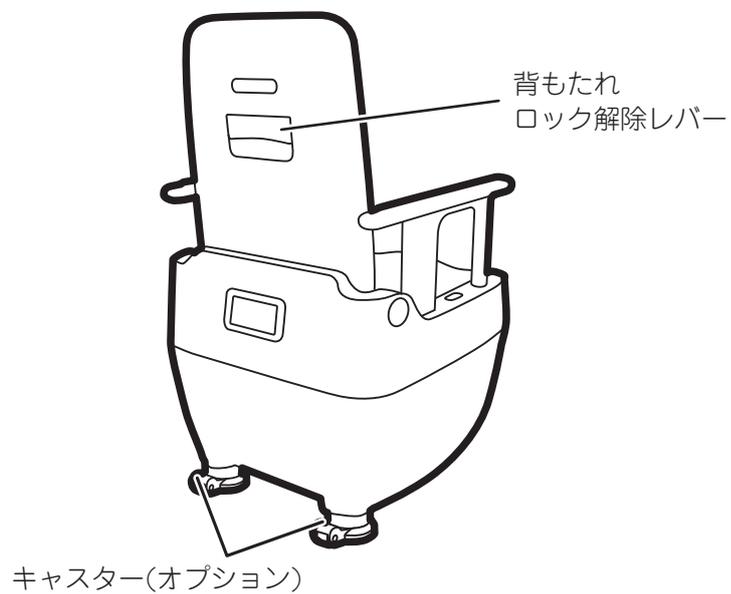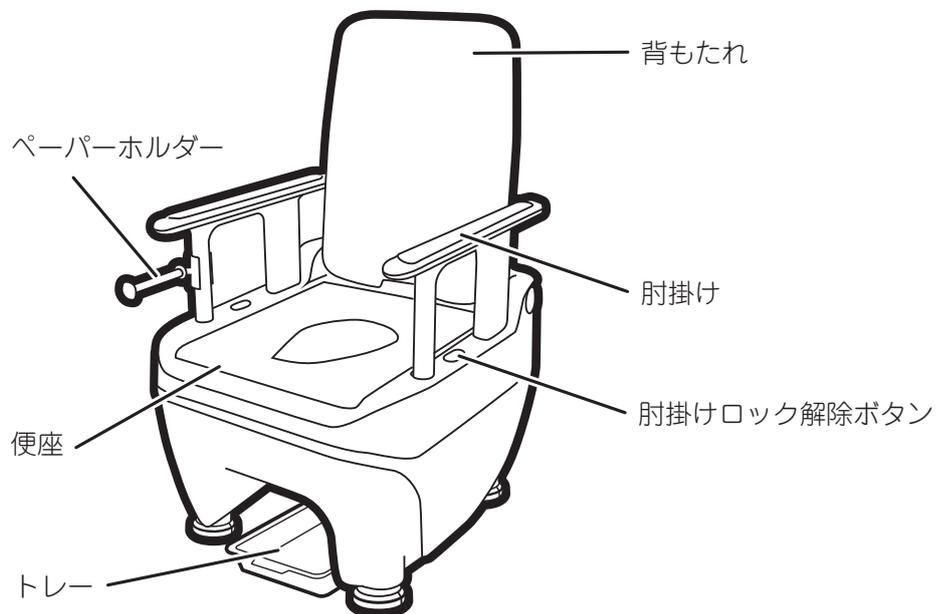


商品寸法図

は
じ
め
に


正面

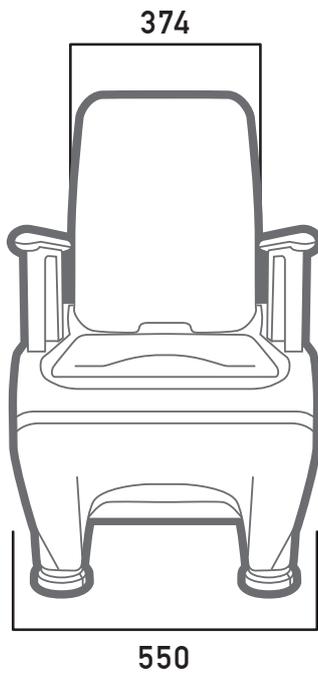

真横

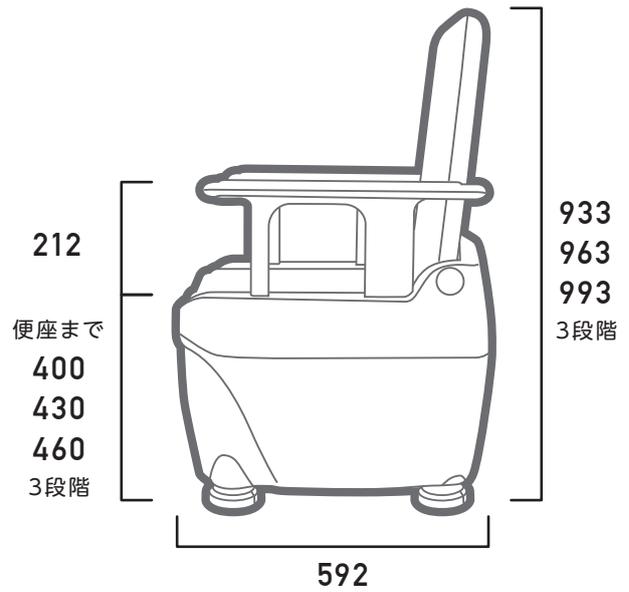

便座

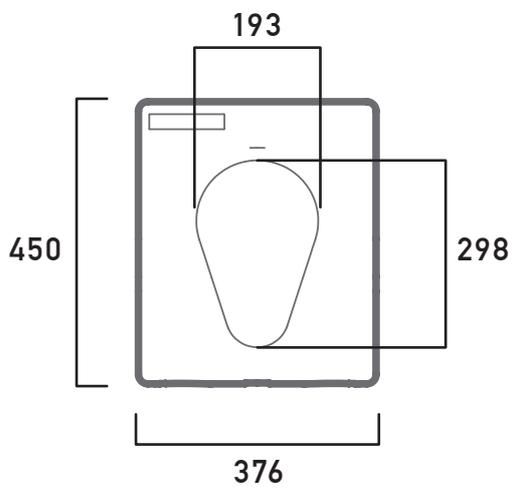

本体を組み立てる

1 肘掛けを取り付ける(左右)


肘掛けは、肘掛け支柱が幅広くなっている側を後ろ側にして、本体の穴に真っ直ぐ最後まで押し込みます。



注意

肘掛けを最後まで押し込んだ後に、軽く上に引っ張り、肘掛けがロックされていることを確認してください。


ロックされていないと、肘掛けが外れ、不安定になり、けがの原因になります。

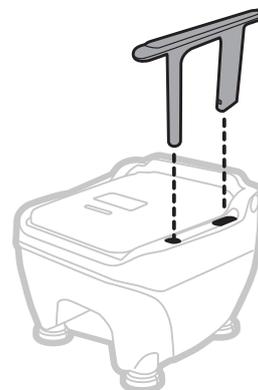

必ず守る

移乗のため肘掛けの片側を外して使用する場合は、肘掛け穴カバーを取り付けてください。


肘掛けを差し込んでいる穴が見えている状態で使用すると、お尻や手指が入り込み、けがの原因になります。

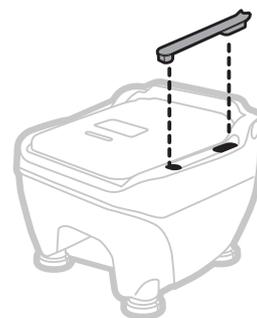

つかう

2 背もたれを立てる

背もたれを持ち上げ、後ろ側へ最後まで持ち上げます。

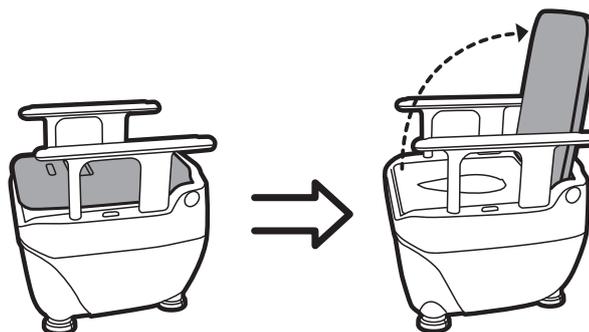

注意

背もたれを最後まで持ち上げた後、軽く前側に傾け、背もたれがロックされていることを確認してください。

背もたれが倒れたり手をかけた時に不安定になり、けがの原因になります。


本体を組み立てる(つづき)

3 座面の高さを調節する (例:46cmに高さ調整)

※脚は3段階(床面から便座まで約40cm/43cm/46cm)の高さ調節が可能です。


座面の高さ	調節内容
40cm	本体脚ゴムを取り付け
43cm	高さ調節脚1個と本体脚ゴムを取り付け
46cm	高さ調節脚2個と本体脚ゴムを取り付け

- ① 高さ調節脚同士をはめ込みます。
- ② 高さ調節脚をひねり、ロックします。
- ③ 脚ゴムを差し込みます。
- ④ 脚ゴムをひねり、ロックします。
- ⑤ オーブの脚部に高さ調節脚をはめ込み、ひねりロックします。

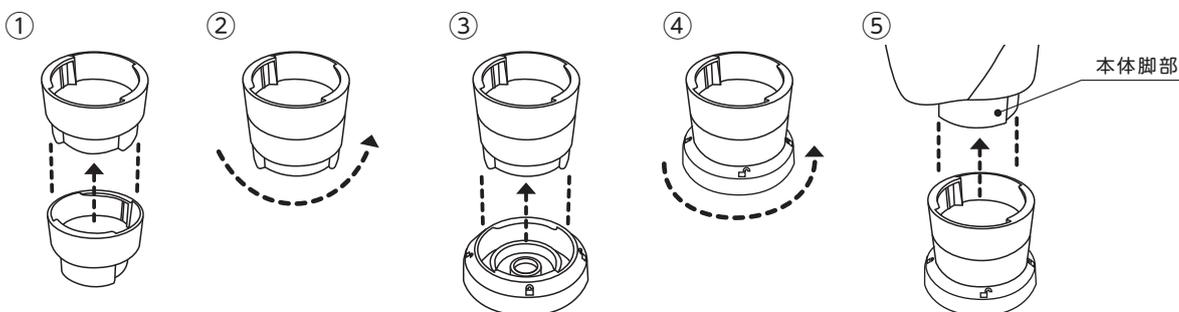

4 キャスターの取り付け方法 (オプション品)

キャスターを取り付ける場合は、座面の高さを調節した後に、後方脚部にはめ込んでから、ひねりロックします。

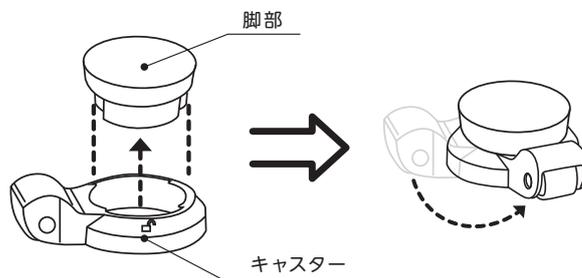

5 ペーパーホルダーを取り付ける

ペーパーホルダーは左右両方の肘掛けの支柱にお好みの角度で取り付けることができます。


! 必ず守る

ペーパーホルダーを手すりがわりにしないでください。
転倒やけがの原因になります。



6 トレーをセットする


トレーは本体の下に必ず設置してください。

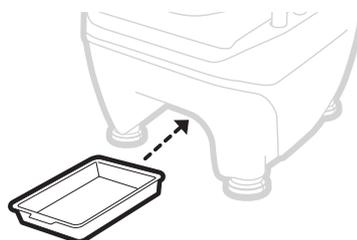

使用方法

1 バケツ蓋を取り出す

便座とインサイドカバーを持ち上げて、バケツの蓋を取り出します。便座とインサイドカバーを戻して、ご使用ください。

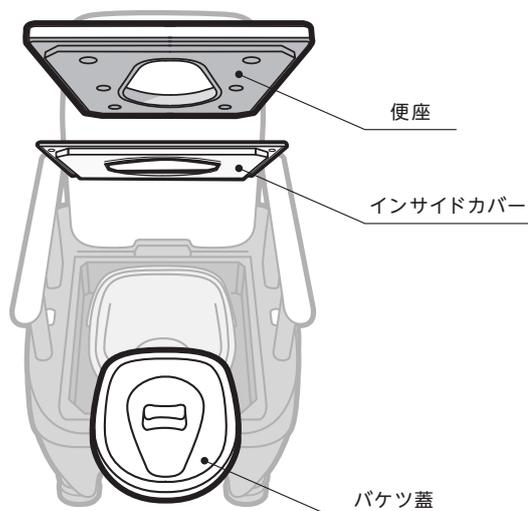

2 汚物の処理について


ご使用後はポータブルトイレ本体からバケツだけを取り外して、汚物をご家庭のトイレに流してください。



つかう

暖房便座の使用方法

各部の名称

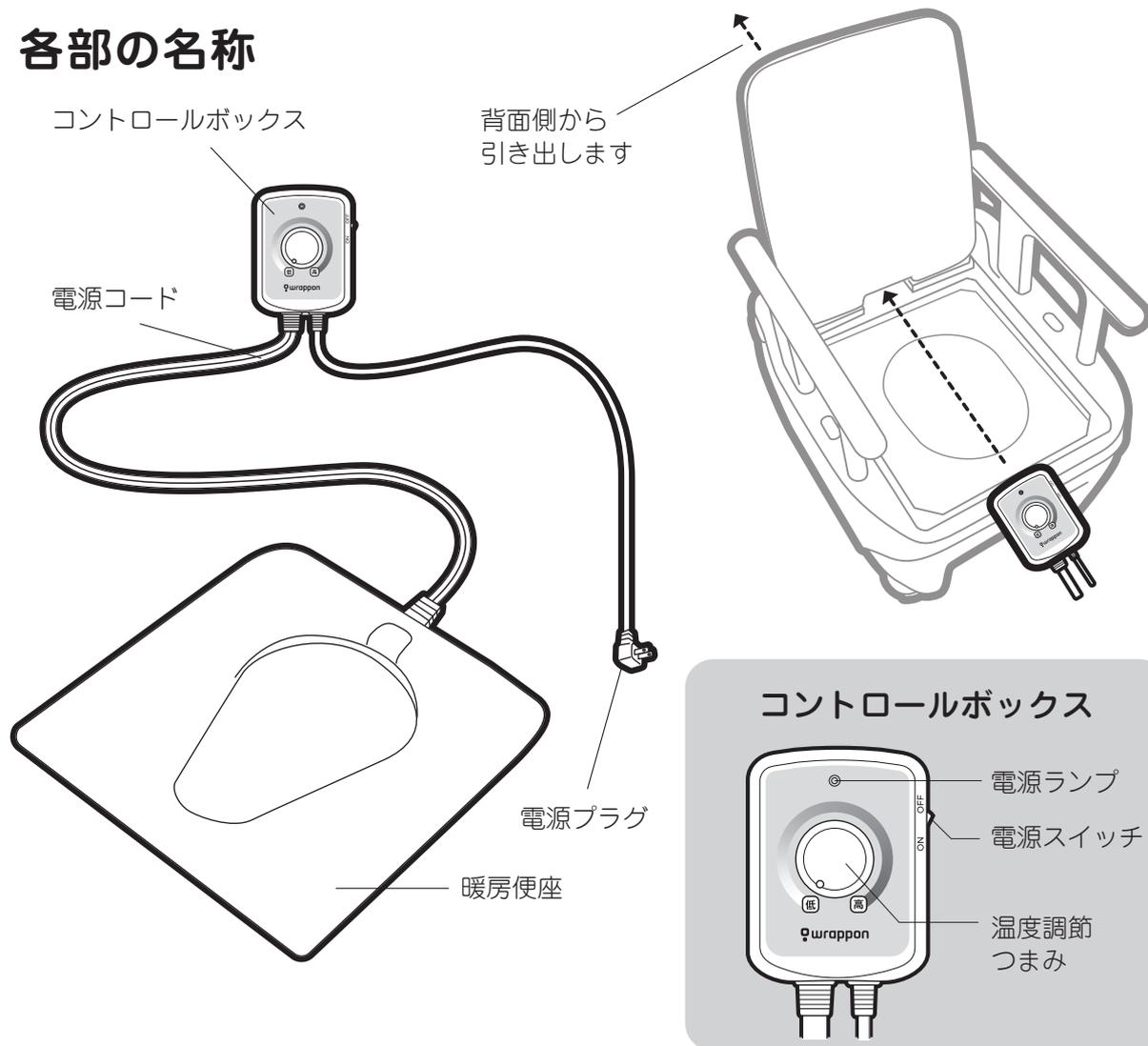

使用方法

- 1 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチをONにする**
AC100Vのコンセントに差し込んでください。
- 2 温度調節をする**
温度調節つまみを回して温度を調節します。
「低」から「高」の間で約28～40℃の調節が可能です。

⚠ 注意

40℃程度でも皮膚の同じ箇所に長時間触れているとヤケドを起こす恐れがあります。

お手入れ

- ・電源プラグを抜いてください。
- ・水の中に浸さないでください。
- ・柔らかいスポンジか布でお手入れしてください。洗剤は中性洗剤を使用し、乾いた布で水分を拭きとってください。

警告

- ・水や小水をかけないでください。
 - ・長時間座る時は、便座温度を「低」またはスイッチを「OFF」にしてください。
 - ・踏み台として使用しないでください。
 - ・便座または電源コードが破損した場合、ご使用を中止してください。
 - ・次の方が使用される時は、便座温度を「低」またはスイッチを「OFF」にして、周りの方が十分に注意してあげてください。
- 【お子様、お年寄り、病気の方、ご自身で温度調整ができない方、皮膚感覚の弱い方】
- ・電源コードが破損した場合、危険ですので、ラップホン・セイフティーコールにご連絡ください。

注意

- ・塩素系洗剤、殺虫剤、シンナー等を便座にかけないでください。
- ・長時間使用しない場合は、スイッチを「OFF」にするか、電源プラグを抜いてください。

ケーブルによる転倒を防止するために

【使用時】

リモコンを壁等に固定してください。



故障と思ったら


便座が暖かにならない場合

- ①電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
- ②電源ランプが点灯しているか確認してください。

各機能の使用法

背もたれをたおす場合

背もたれの後ろ側の背もたれロック解除レバーを上押しして、背もたれロックを解除した状態で前側に倒してください。

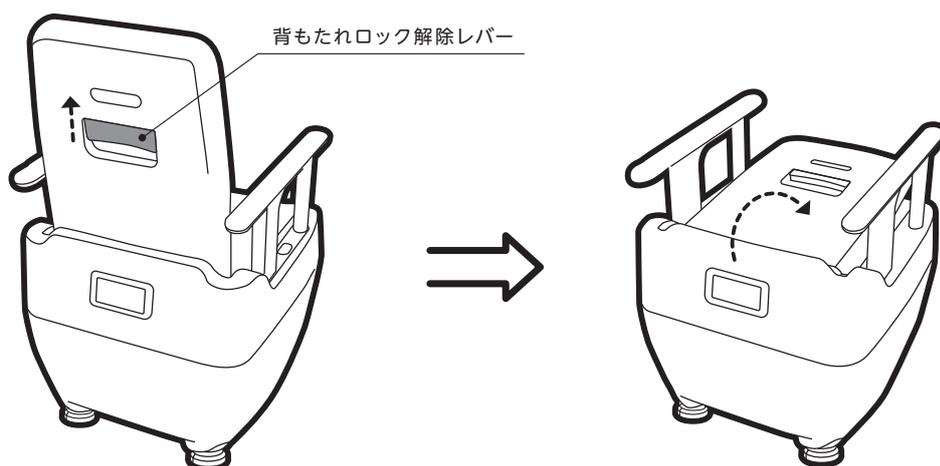

キャスターの使用法

キャスターは移動するときにご使用ください。

移動するときには、肘掛けがしっかりロックされていることを確認し、肘掛けの前側を持ち上げて移動させてください。




！ 必ず守る

トイレに人が座った状態では移動させない
キャスターの破損やけがの原因になります。

移動するときには汚物が入っていないことを確認する
大きく傾けて移動すると、汚物がこぼれるおそれがあります。

お手入れをする

製品をいつまでも清潔にご使用いただけるよう、ご使用ごとにお手入れをしてください。
各部品は下図のように取り外してお手入れすることができます。

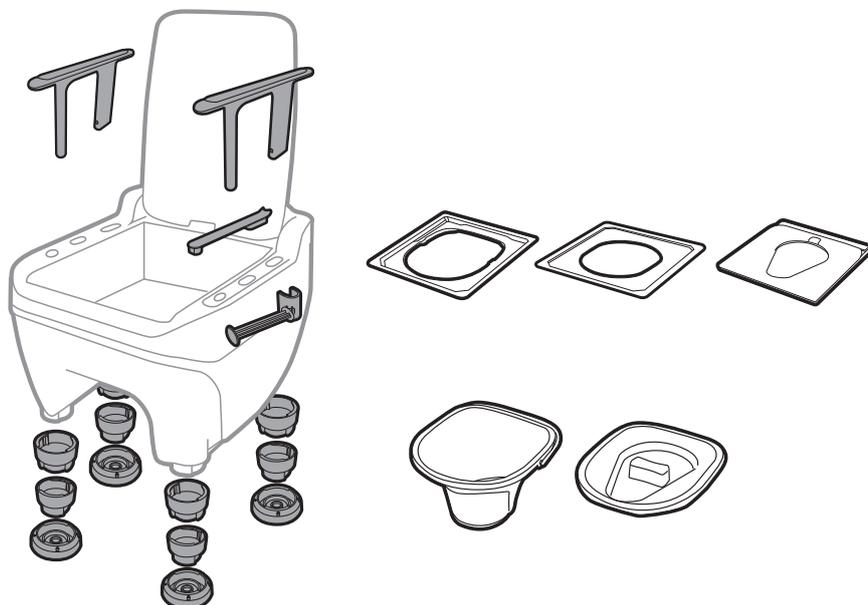

！ 必ず守る

次のものでお手入れをしないこと。

●塩素系洗剤 ●酸・アルカリ性洗剤 ●シンナー ●クレゾール ●たわし ●研磨入りスポンジ ●磨き粉 ●熱湯(煮沸消毒等)

屋外で放置したり、直射日光にあてないでください。

日常のお手入れ

●本体

軽い汚れ……硬めに絞ったやわらかい布で水ぶきしてください。

ひどい汚れ……うすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布でふき取ってください。その後、水ぶきしてください。

●トレー・便座

うすめた中性洗剤で汚れを落とし、水洗いしてください。

●やわらか便座

ベースシートは、本体と同様のお手入れをしてください。

ソフトシートは、ベースシートから取り外して水洗いできます。洗剤をご使用の際は、中性洗剤をご使用ください。

お手入れをする時は、手洗いまたはやわらかいスポンジをご使用ください。

洗った後は水分をふき取り、日陰干しでよく乾かしてください。

⚠ 洗濯機や硬いブラシを使用してのお手入れはお止めください。製品を著しく損傷させる恐れがあります。

●暖房便座

お手入れ・点検のときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

便座・コントロールボックスには水をかけないでください。

⚠ 感電、ショート、火災の原因になります。

保管をする

保管する場所について

室温が0℃～+40℃で、湿度の低い屋内が最適です。

⚠ 注意

次のような場所に製品を保管しないでください。

- ちりやほこりが多い場所
- 浴室など湿度が80%を超える場所
- 雨や直射日光が当たる場所

仕様

項目		仕様
製品名		ラップオン・オーブ バケツ
品番		OBSEBMN1JH(普通便座)/OBSEBMS1JH(やわらか便座)/ OBSEBMW1JH(暖房便座)
材質	椅子	ポリプロピレン樹脂
	普通便座	ポリプロピレン樹脂
	やわらか便座	EVA樹脂・ポリプロピレン樹脂・発泡ポリエチレン
	暖房便座	ABS樹脂
寸法	外形(組み立て)	55cm(幅)×59.2cm(奥行)×93.3~99.3cm(高さ)
	座幅	54.4cm
	床面から便座までの 高さ(3段階調節可能)	40cm、43cm、46cm
	便座から肘掛けまでの 高さ	21.2cm
質量		本体約12.3kg
最大使用者体重		100kg以下

暖房便座 仕様

項目	仕様
製品名	暖房便座(B)
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	42W(塩ビ被覆ヒーター)
安全装置	電子制御・温度ヒューズ(77℃)
電源コード	本体側:1.2m 電源側:1.6m
材質	暖房便座・コントロールボックス:ABS樹脂
便座表面温度	温度調節範囲 室内温度25℃の場合、約28~40℃(無段階設定)

この仕様は予告なく変更することがあります。

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

保証とアフターサービス

ユーザー登録していない場合、保証書は無効となります。

右記ホームページより必ず登録をしてください。 <https://wrappon.com/register>



保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名・シリアル番号」お確かめの上、本取扱説明書内の製品保証書にご記入ください。内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

— 保証期間 —

保証書に記載通り

定期点検

この製品を安全にご使用いただくためには、正しい操作と定期的な整備をおすすめします。定期点検整備の費用については、お買い上げの販売店またはラップオン・セイフティーコールにお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店またはラップオン・セイフティーコールにご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しまして保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、引取修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

保証期間内でも下記の場合は有料修理となります。

- 1)本保証書のご提示がない場合。
- 2)本保証書にシリアル番号、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3)お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱いによる故障または損傷。
- 4)火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障または損傷。
- 5)当社以外による不当な修理や改造に起因する故障及び損傷。
- 6)取扱説明書と異なる不適切な取扱いまたは使用による故障及び損傷。
- 7)付属品、添付品、消耗品などの損傷および汚れ。
- 8)指定外の電源(電圧、周波数)変動による故障及び損傷。(暖房便座)
- 9)訪問修理可能なものについて、お客様が訪問修理を希望される場合。

ラップオン・セイフティーコールへご連絡いただく前に 下記をご準備ください。

1.保証書


右記保証書にご記入いただいた「シリアル番号」「お買い上げ日」「販売店」お伝えください。

※保証書に記載の保証期間内に故障した場合、保証書をご提示いただければ無料修理を行います。

また、保証期間内であっても保証書に記載の無料修理規定対象外の場合は有料となります。

2.シリアル番号の確認

製品に貼付されているシリアル番号(0Bで始まる番号)をご確認ください。
本体の後ろ側に記載されています。

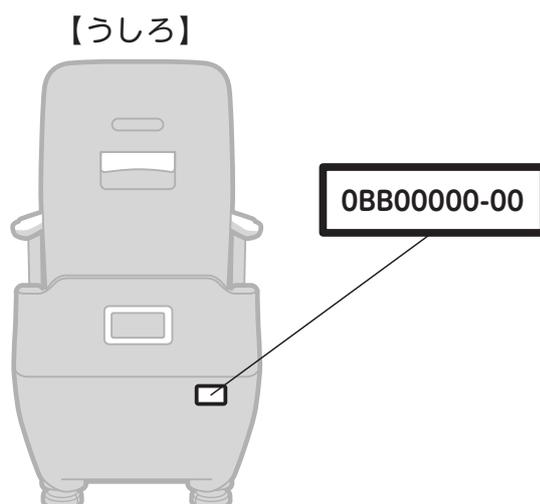

お客様相談窓口

ラップオン・セイフティーコール



ニオワ ナイワ
0120-208-718

受付時間：月～金 9:00～17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

ユーザー登録について

ユーザー登録は弊社ウェブサイトよりご登録頂けます。 <https://wrappon.com/register>



ラップオン 製品保証書

【無料交換規定】

- 保証期間中に取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品に不具合発生した場合は、当社は本規定に従い、無料で当社の判断に基づく本製品の全部または一部の交換を行います。交換を依頼される場合は、必ず本保証書を本製品にご添付ください。
- 本製品の交換を希望される場合は、お買い上げの販売店、またはラップオン・セイフティーコールへご連絡ください。
- 保証期間内でも下記の場合は有料修理となります。
 - ユーザー登録をしていない場合。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にシリアル番号、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱いによる故障または損傷。
 - 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障または損傷。
 - 不具合の原因が本製品以外に起因する場合。
 - 当社以外による不当な修理や改造に起因する不具合及び損傷。
 - 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による不具合及び損傷。
 - 付属品、添付品、消耗品などの損傷および汚れ。
 - 指定外の電源（電圧、周波数）変動による不具合及び損傷。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

ユーザー登録をしていない場合、この保証書は無効となります。
同封のユーザー登録ハガキまたは右記ウェブサイトですべて登録を
してください。

<https://wrappon.com/register>



お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お客様	ご住所 〒		
	お名前	TEL	
販売店			
シリアル番号			

※上記項目の内容をご確認いただき、お客様ご自身でご記入ください。

本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。



日本セイフティー株式会社

NHON SAFETY CO.,LTD.

〒102-0082

東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル 11F

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

 wrappon[®]

 **日本セイフティー株式会社**

〒102-0082

東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル 11F

TEL(03)6369-2223 FAX(03)6369-2228

OBMAB001J 2024年11月 初版